



Само за ветеринарна употреба

Feline 3DX Test

- Feline Panleukopenia Virus Antigen Test
- Feline Coronavirus Antigen Test
- Giardia Antigen test

Комбиниран тест



Тестът Bioguard Feline 3DX е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на котешки парвовирус (FPV), котешки коронавирус (FCoV) и Giardia (GIA) във фекални проби от котки. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони Т (тестова) и С (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество FPV Ag, FCoV Ag или GIA Ag, се появява видима тестова линия (Т). Контролната линия (С) винаги трябва да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава, че тестът е валиден. По този начин касетата точно показва наличието на антигени на FPV, FCoV или GIA в изследваната проба.

КОМПОНЕНТИ В КОМПЛЕКТА

КОМПОНЕНТИ	1 ТЕСТ	5 ТЕСТА	10 ТЕСТА
Feline 3DX тест касета	1	5	10
Капкомер за еднократна употреба	1	5	10
Епруветка с буфер за анализ	1	5	10
Стерилен тампон	1	5	10
Ръководство за употреба	1	1	1

ПРОБА


Котешки изпражнения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА

- Подгответе запечатаната опаковка с тест касетата, епруветката с буфер за анализ и стерилния тампон.
- Извадете касетата от фолиото и я поставете хоризонтално върху чиста повърхност.
- Съберете фекална проба от котката с тампона и се уверете, че е добре напоен с фекалния материал.


Необходимо е да се спазва количеството фекалии върху тампона, както е показано на изображението по-долу. Прекомерното количество фекалии може да доведе до фалшиво положителен резултат и забавено движение на пробата по тест лентата.

- Развийте капачката на предоставената епруветка с буферен разтвор. Поставете тампона с пробата в епруветката и го разбъркайте. Разклатете, за да се уверите, че пробата се е разтворила добре в буфера.
- С помощта на капкомера внимателно капнете 5 капки (около 100 µL) от извлечената проба в пробовземащото гнездо на теста (избягвайте утаените частици, за да не се запуши отворът).
- Отчетете резултата в рамките на 5–10 минути.
- Резултат, получен след 10 минути, не трябва да се приема за валиден.

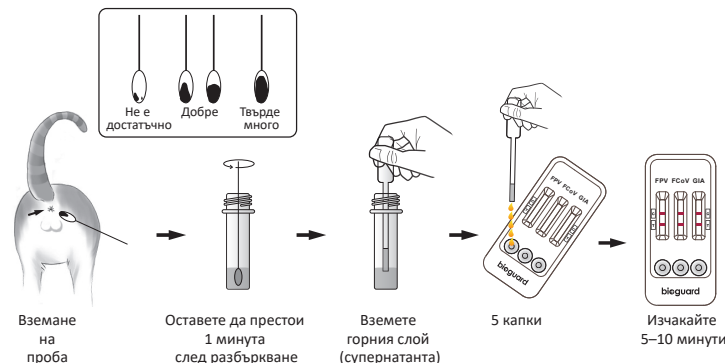

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

- Положителен:** Налице са както линията С, така и линията Т, независимо дали линията Т е ясна или слабо видима.
- Отрицателен:** Появява се само ясна линия С.
- Невалиден:** В зоната С не се появява оцветена линия, независимо дали има линия Т.

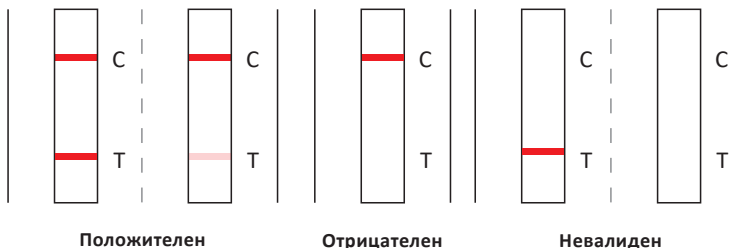

СЪХРАНЕНИЕ

- Комплектите трябва да се съхраняват между 2-30°C.
- НЕ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ.** Ако се съхраняват на студено, дръжте ги на стайна температура за 15~30 минути преди употреба.
- Не излагайте тестовите комплекти на пряка слънчева светлина.
- Тестовите комплекти са стабилни до изтичане на срока на годност (24 месеца), посочен върху алуминиевата опаковка.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- За най-добри резултати, спазвайте стриктно тези инструкции.
- Вижте срока на годност, отбелязан върху опаковката, преди употреба. Не използвайте комплекти с изтекъл срок на годност.
- Не изваждайте касетата от опаковката, преди да сте готови да извършите теста, за да се избегне продължително излагане на въздух и влияние на влага. Всички манипулации трябва да бъдат извършени в рамките на 10 минути след отваряне на опаковката.
- Всички компоненти в комплекта – касета, капкомер, буферен разтвор и тампон – са за еднократна употреба. Не ги използвайте повторно. След приключване на теста изхвърлете пробите и използваните материали в съответствие с Добрата лабораторна практика (GLP).
- Не местете касетата след нанасяне на пробата в гнездото, за да се избегнат необичайни отклонения в резултатите.
- Компонентите в този комплект са преминали контрол на качеството като стандартна производствена партида. Не смесвайте компоненти от различни партидни номера.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Тестът е предназначен само за ветеринарна употреба и за in vitro диагностика. **Той не може напълно да изключи възможността за фалшиво отрицателни или фалшиво положителни резултати, предизвикани от различни фактори.** Поради това, освен резултатите от тестовия комплект, ветеринарният лекар трябва да взема предвид и друга клинична информация, както и резултати от лабораторни изследвания, за да постави окончателна диагноза.